

E-ceph 2.0 试用版安装流程

1. 点击试用版 ,选择安装包下载路径, 点击下载


E-ceph2.0试用版功能

- 侧位美学头影测量及正位美学头影测量功能
- 两点确定17个美学头影测量标志点功能
- 2个常规头影测量指标、13个侧位软硬组织美学头影测量指标及6项正位美学头影测量指标
- 测量标志点名称提示功能
- 头颅定位X片的标尺校准及记忆功能
- 头颅定位X片亮度对比度连续调节功能
- 头颅定位X片大小4种调节功能
- 测量文件数据库保存及导入导出功能
- 每个病例多次测量及储存功能
- 测量病例的检索功能及排序功能
- 美学头影测量测量报告打印功能


试用版 :  (免费试用2个月)




2.找到安装包， 双击安装包打开安装程序

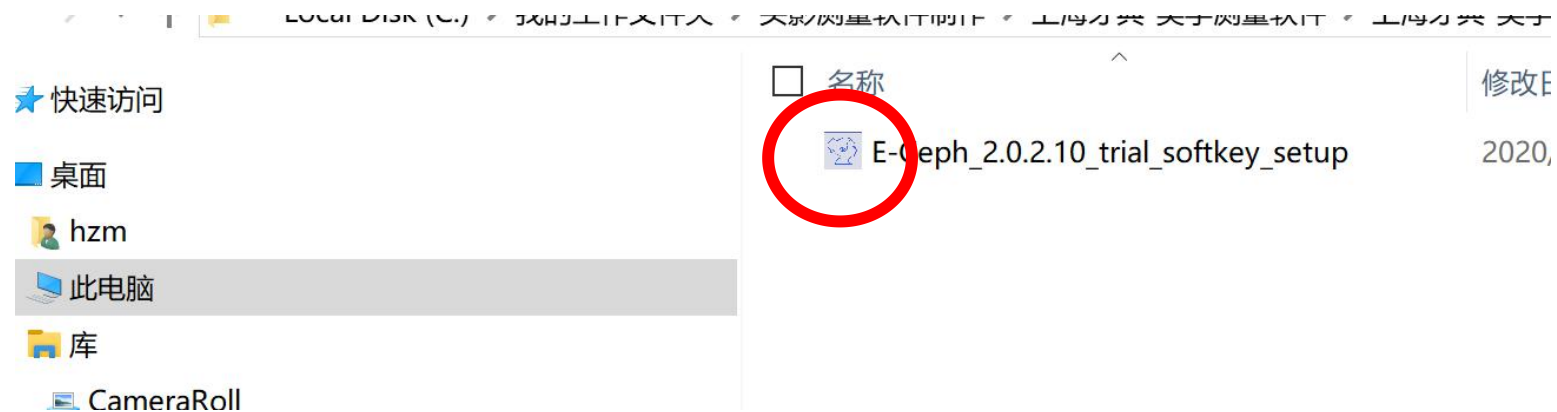


安装时可能出现下面提示，依次点击“更多信息”、“仍要运行”

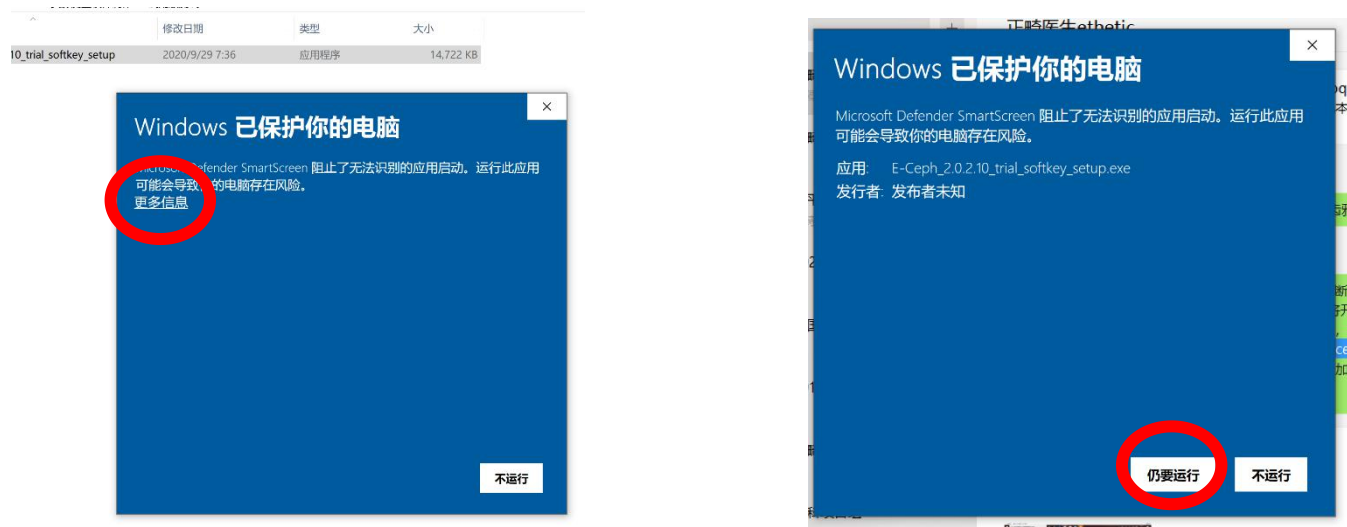


3. 出现如下询问时点击“是”

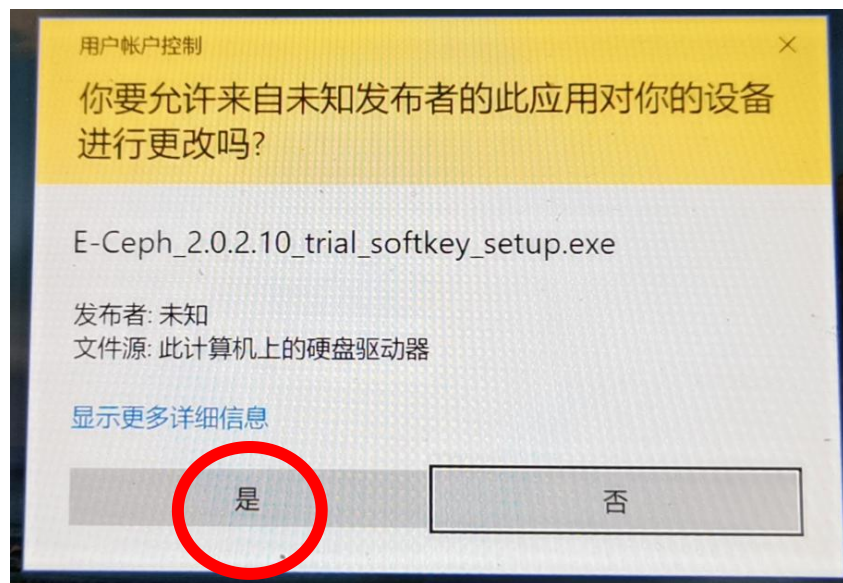


4. 点击同意安装许可协议， 点击下一步。

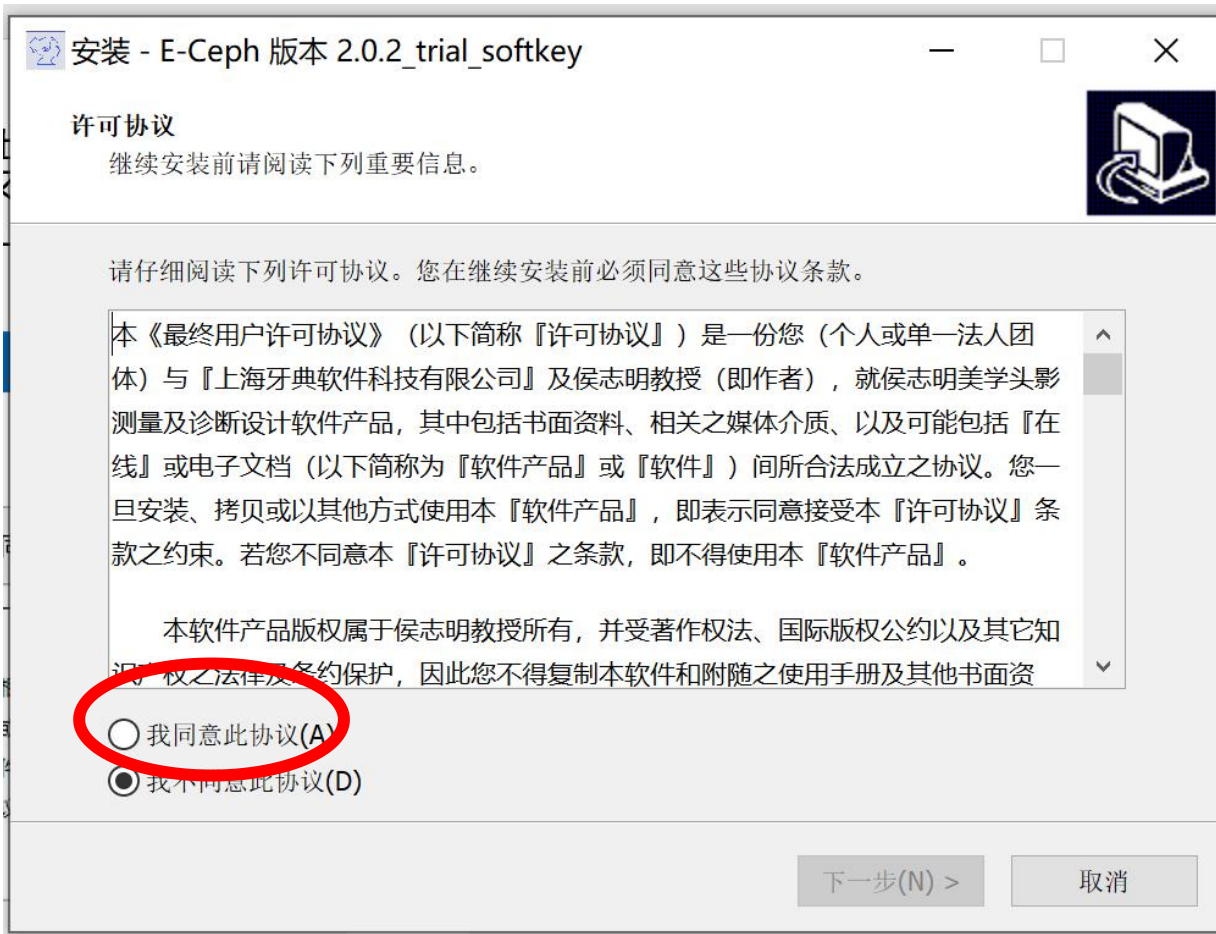


5. 选择软件的安装位置， 点击下一步

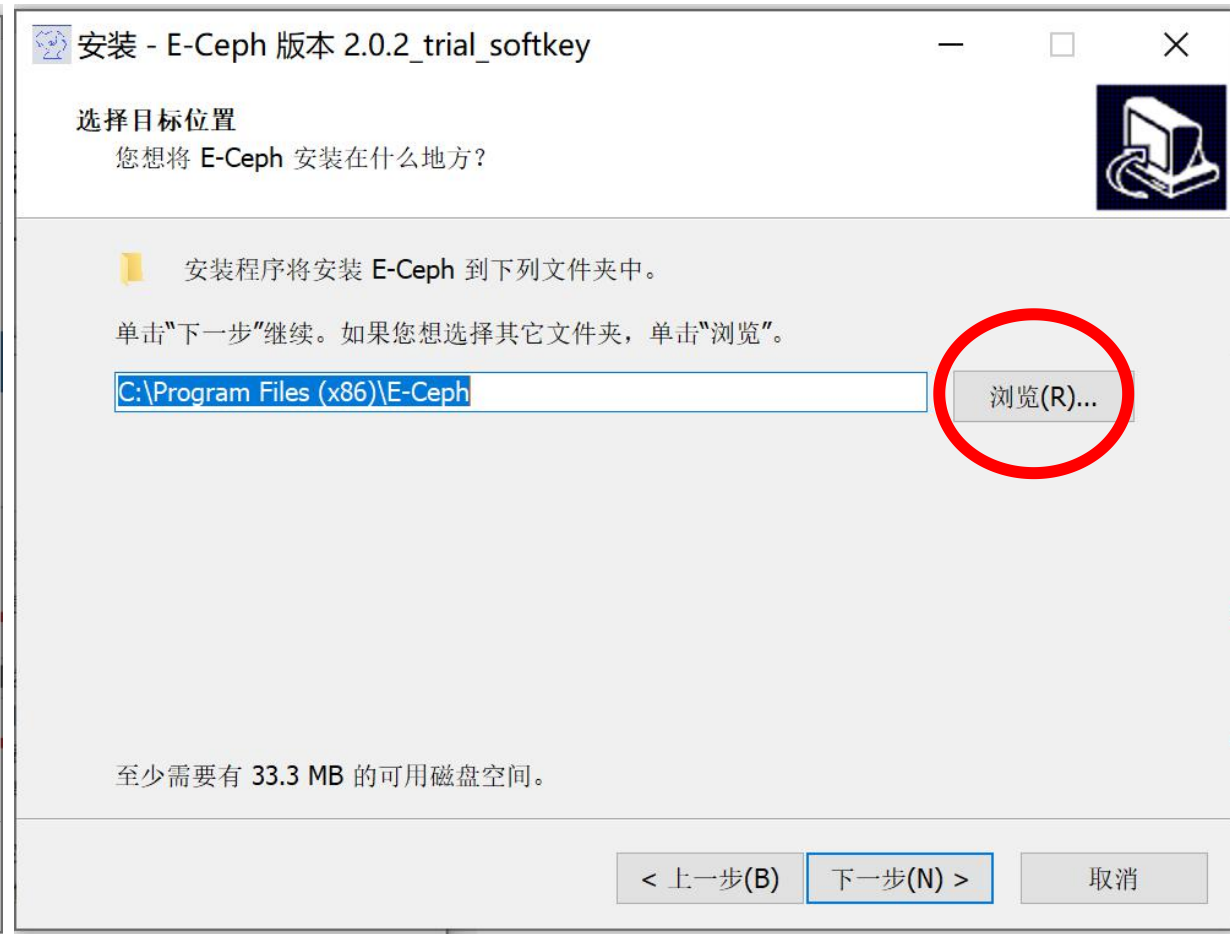


6. 确认创建桌面快捷方式，点击下一步。

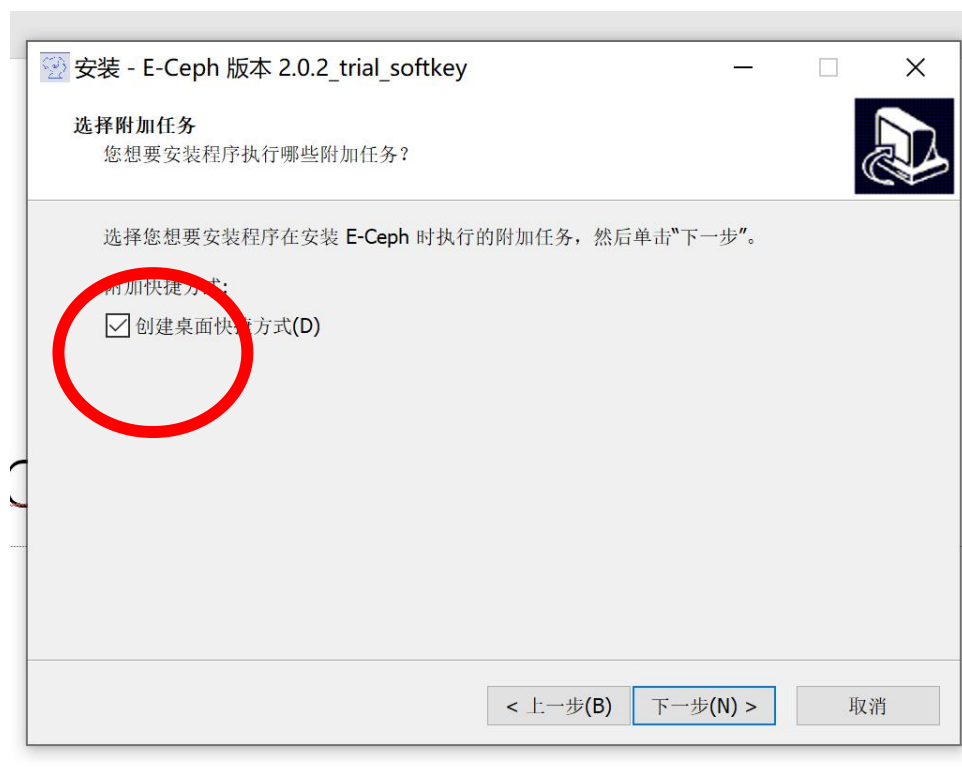


7. 创建安装文件夹，点击确认安装。

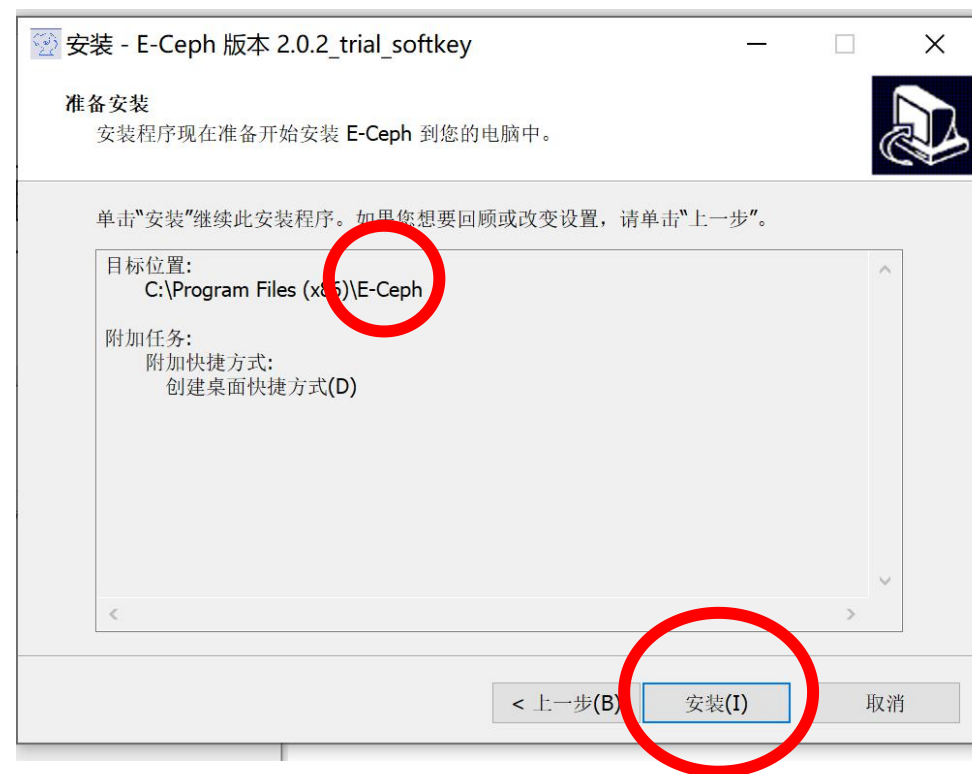

8. 显示安装进度。

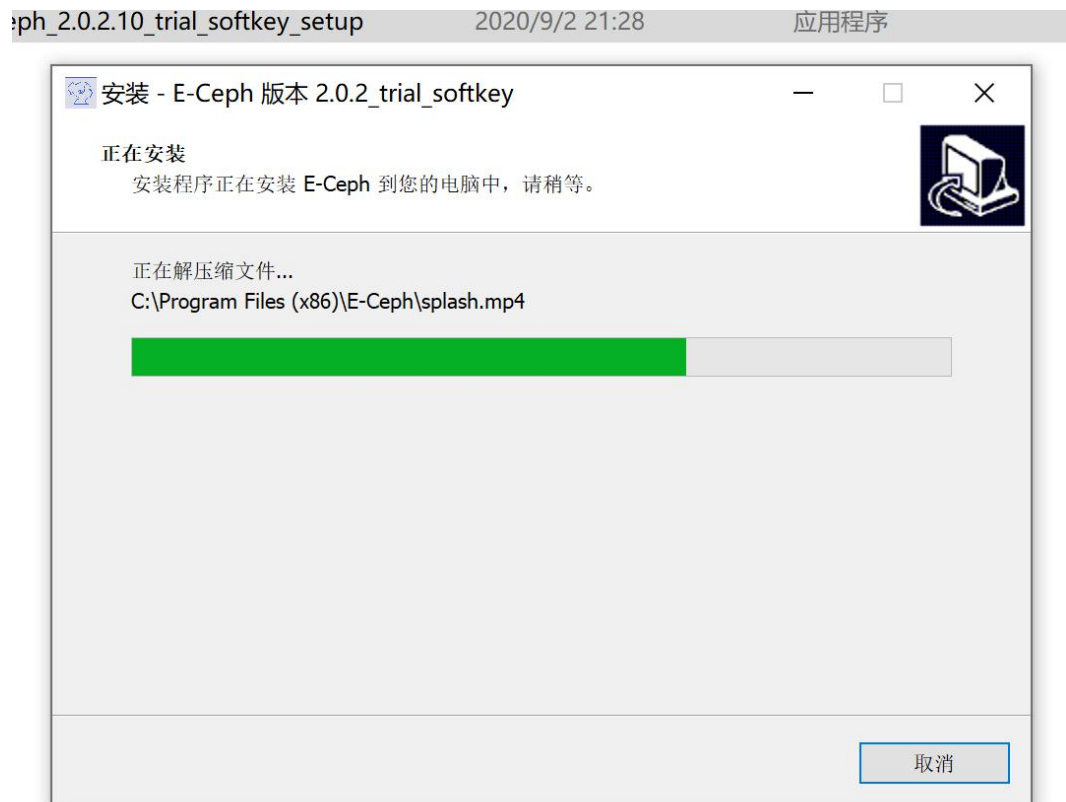

9. 在弹出的认证界面复制识别码

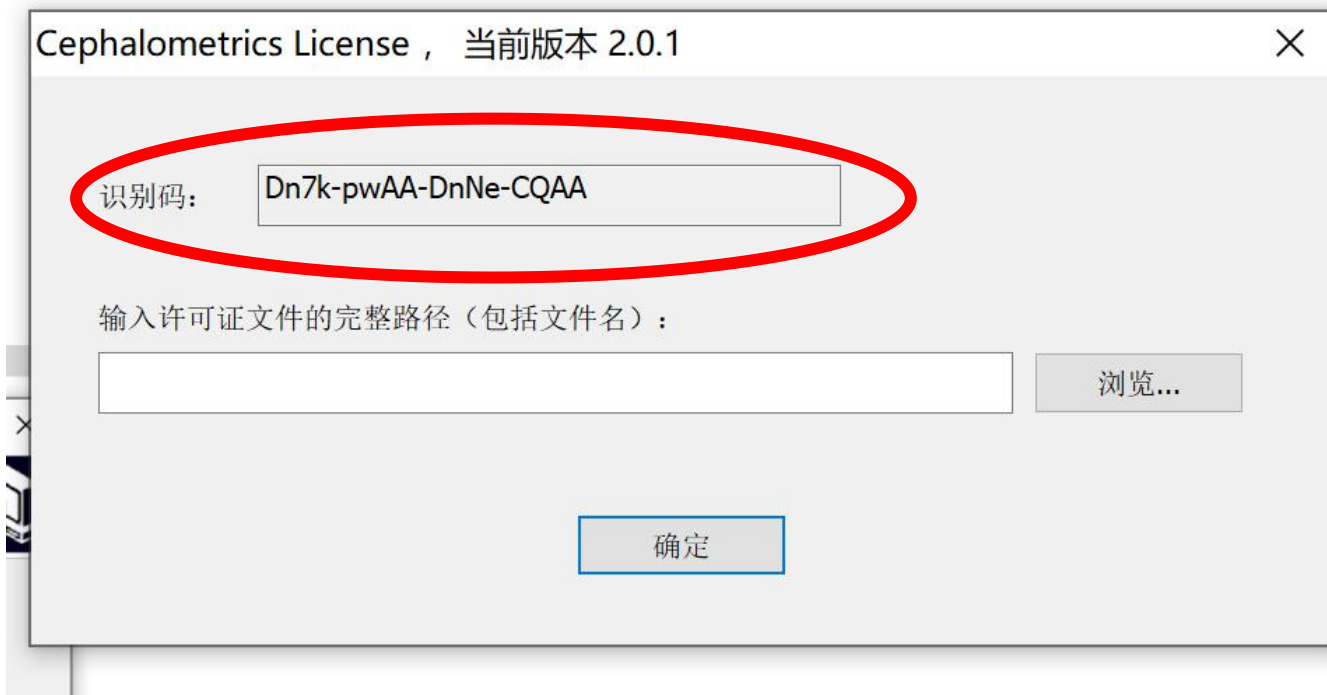

10. 微信扫描网站右下角上海牙典软件科技的微信二维码

正畸美学
E-ceph® 头影测量及诊断设计网

3088 首页 E-ceph2.0 关于牙典 正畸美学团队 正畸美学医师 咨询服务 美学病例 科普文章 注册 | 登录

美学矫治设计版	4988	9488	11888	15888	21888	32888
---------	------	------	-------	-------	-------	-------

局网版E-ceph2.0价格						
	5年		10年		永久	
	2点	每增加1个点	2点	每增加1个点	2点	每增加1个点
美学测量版	12588	4000	18888	6000	27888	8500
美学诊断版	17888	5500	26888	8500	39888	12000
美学矫治设计版	23888	7000	32888	11000	48888	15000

正畸美学
头影测量及诊断设计网

沈阳艾因惜美软件科技有限公司
邮箱: ecephservice@163.com
地址: 沈阳市和平区北三经街10-2号


销售联系: 上海牙典软件科技有限公司
邮箱: eceph@acedental-int.com
地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄162号560室

eceph@acedental-int.com | 400-855-0686 备案号: 辽ICP备2020011436号 Copyright ©2020 ALL Rights Reserved正畸美学头影测量及诊断设计网 版权所有



11.添加客服人员



12.发送：姓名，单位，电话 所在省市，电子邮箱，微信
E-ceph2.0试用版安装识别码

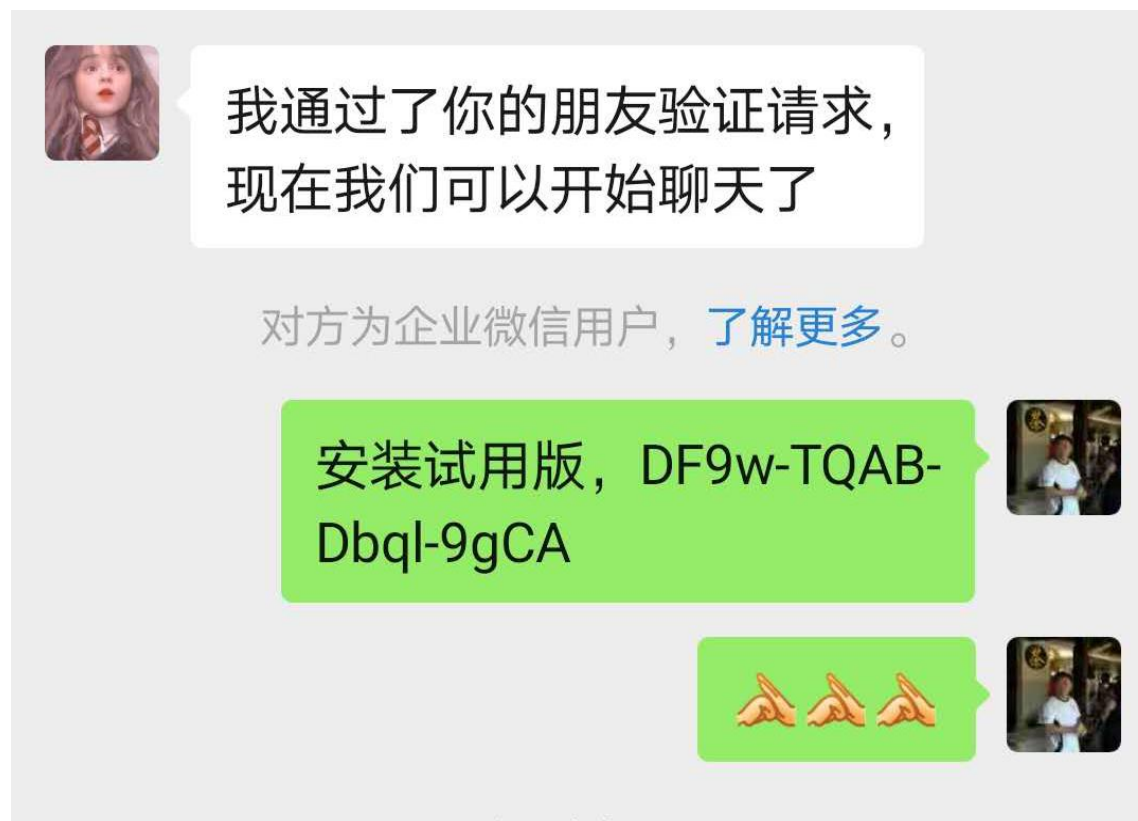


13. 将客服发回的许可文件下载到指定文件夹

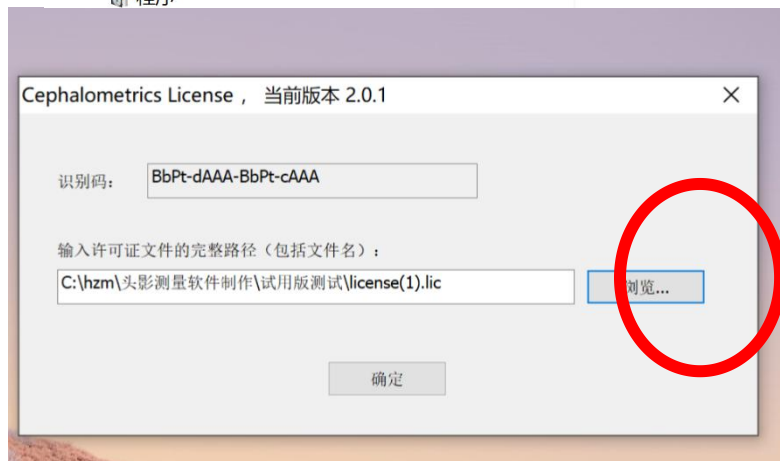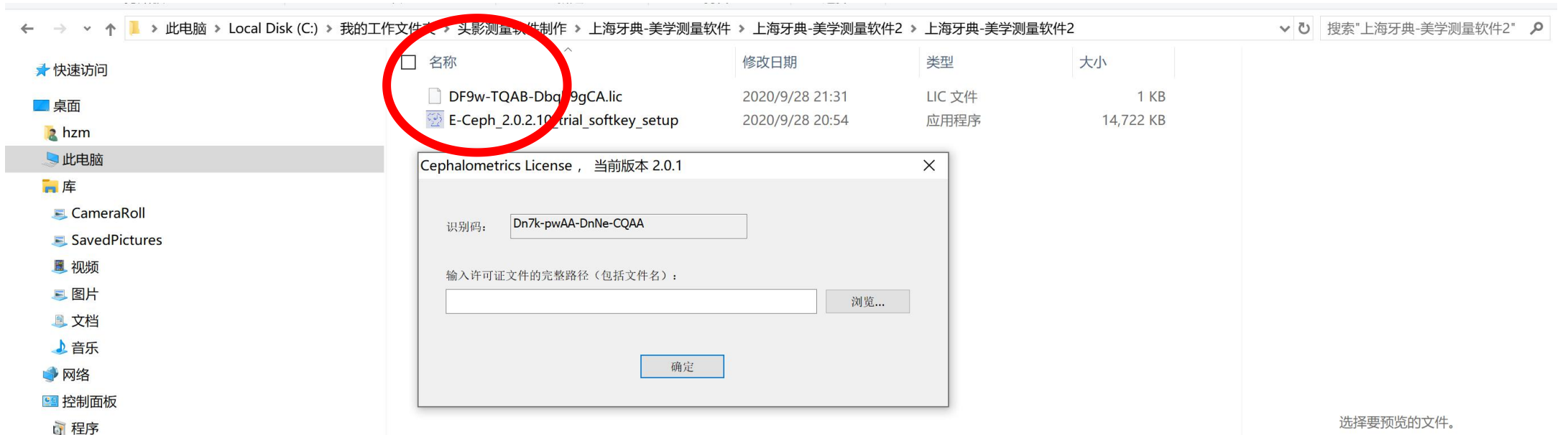

14. 导入许可文件， 点击确定

15.从桌面或开始菜单打开E-ceph

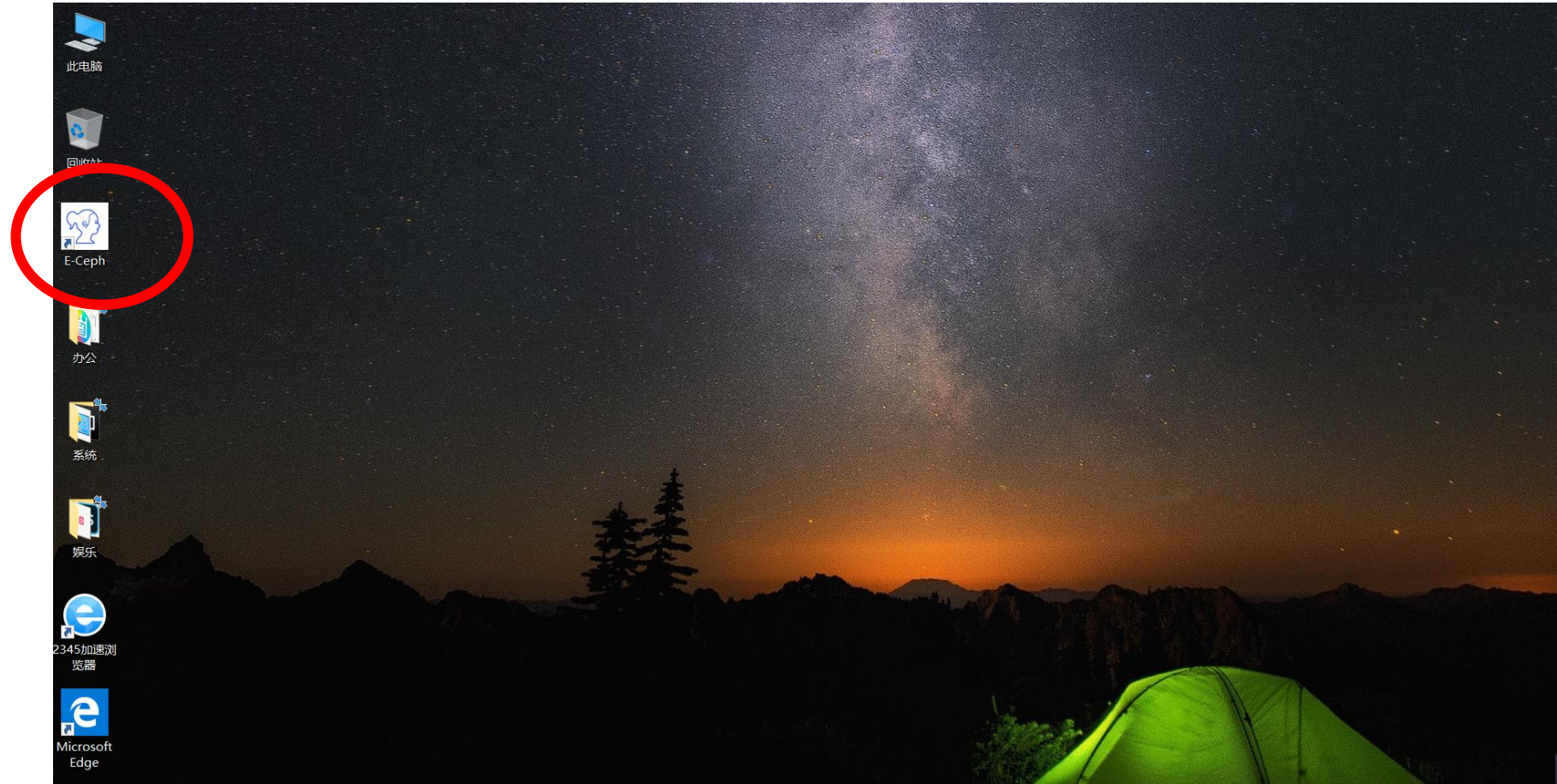

16.弹出下面对话框，进行详细选项设置

设置

患者X光片数据目录

机构名称

计算机编号

启动时动画持续时间

测量项目列表字体大小 ▲▼

预览测量结果界面大小 ▲▼

预览美学诊断界面大小 ▲▼

运行在PC上 运行在Surface平板设备上

- 患者x光片测量数据存放位置
- 使用者所属机构名称或医生
- 使用者计算机编号（客服与许可文件一同发送）
- 软件启动运行时动画播放时长（可输入5-28之间的任意数字）
- 运行设备选择
- 完成后点确定

17.输入相关信息后，确认启动软件

设置

患者X光片数据目录

机构名称

计算机编号


启动时动画持续时间

测量项目列表字体大小 ▲ ▼

预览测量结果界面大小 ▲ ▼

预览美学诊断界面大小 ▲ ▼

运行在PC上 运行在Surface平板设备上

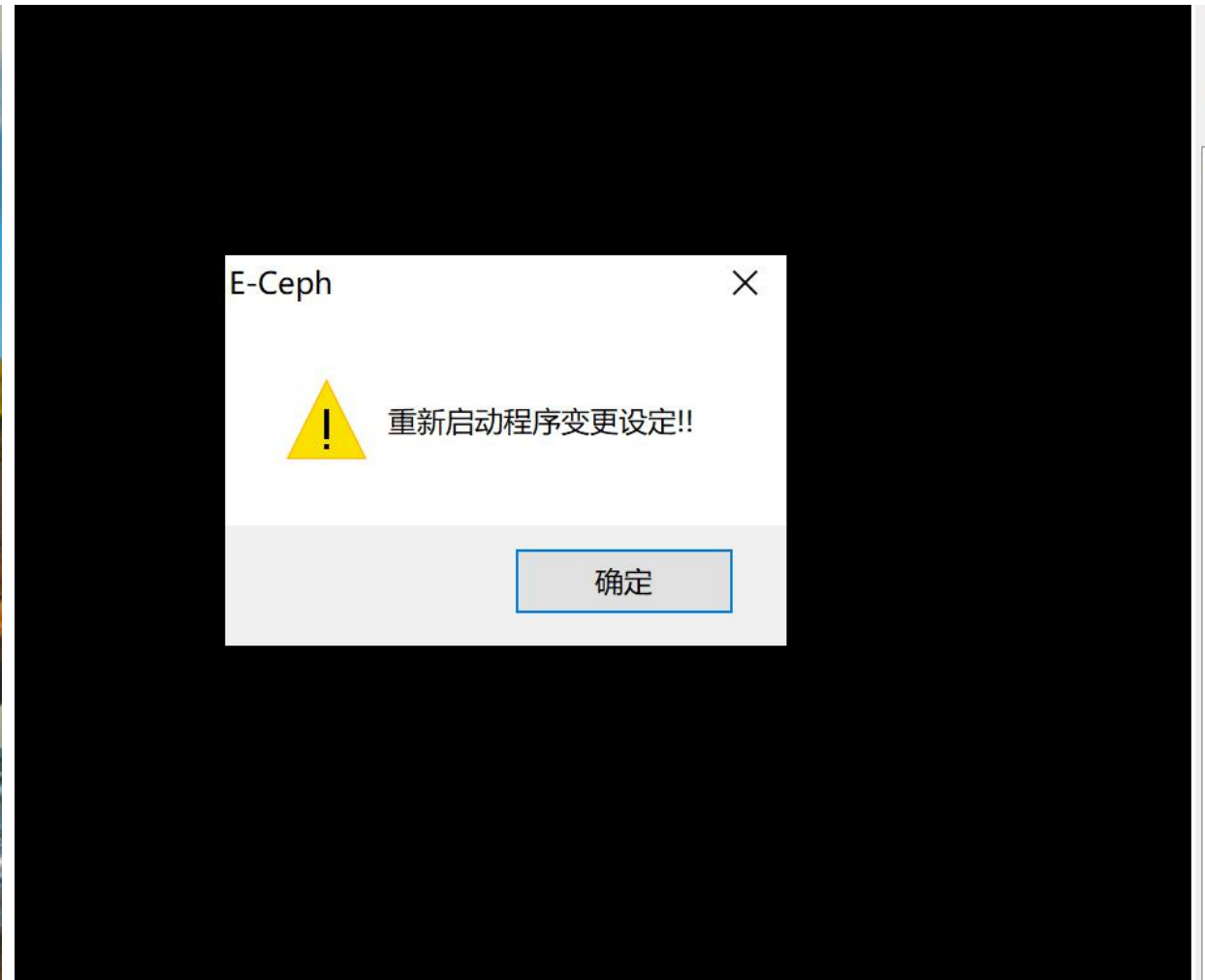

18.进入软件工作界面

